



Tablete dezinfectante efervescent, substanța activă diclorizocianurat de sodiu pentru:

Suprafețe (pereți, pavimente, grupuri sanitare), inclusiv din unități sanitare, echipamente medicale (ploști urinare, tăvi renale, etc.), inclusiv suprafețe moi (cu excepția instrumentarului medical), ustensile aflate în cabinete de înfrumusețare, suprafețe (inclusiv a celor pe care se procesează alimentele), potabilizarea apei, veselă și tacâmuri din bucătării și oficii alimentare, conducte, si zone, echipamente si recipiente de preparare a mâncării sau a băuturii (inclusiv apa potabilă).

Produsul este utilizat în spații private și zone de sănătate publică, agro-alimentar, industrial și colectivități.

SPECTRU de ACȚIUNE

<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Bacillus subtilis</i>	<i>Hepatita B</i>
<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Bacillus cereus</i>	Hepatita C
<i>Escherichia coli</i>	Clostridium	HIV
<i>Methicillin-resistant</i>	difficile	<i>Vaccinia virus</i>
<i>Staphylococcus aureus (MRSA)</i>	<i>Candida albicans</i>	(Coronavirus)
<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	<i>Adenovirus</i>
<i>Enterococcus hirae</i>	<i>Mycobacterium Avium</i>	<i>Poliovirus</i>
Salmonella typhimurium	<i>Mycobacterium Terrae</i>	<i>Murine Norovirus</i>
	<i>(Mycobacterium tuberculosis)</i>	

Teste efectuate conform normelor EN: 13727, 13624, 1276, 1650, 14348, 14476+A2, 13623, 13704, 13697, 17126, 17387, 16777

AVIZE SANITARE: 5132BIO/02/12.30, 2032BIO/04/12.30 și 2257BIO/05/12.30 eliberate de Ministerul Sănătății.

PROPRIETĂȚI:

Caracteristica	Atribut și AVANTAJE
Substanța activă CLORUL	CLORUL ca substanță activă a cărei acțiune BIOCIDA este demonstrată în timp.
Spectru de acțiune	Spectru de acțiune larg, demonstrat prin teste efectuate de laboratoare acreditate conform normelor europene
Mod de prezentare: TABLETE solide, efervescente, cu conținut de clor activ de 1,5 g / tabletă	Dozarea este foarte ușoară prin gestionarea numărului de tablete. Nu necesită dispozitive de lucru sau de măsurare a dozajului.
Solubilitate	Tabletele fiind efervescente se dizolvă rapid în prezența apei.
Stabilitate, stocare, manipulare	Ușor de stocat. Termenul de valabilitate al tabletelor este de 3 ani.
Utilizări multiple	Se utilizează în multe domenii: sanitar, alimentar, colectivități, potabilizarea apei.
Prețul de cost	Concentrația mică de utilizare duce la un preț scăzut al actului de dezinfecție.

MOD de ACȚIUNE

Substanța activă DICLORIZOCIANURATUL DE SODIU, este activă într-o soluție apoasă. În contrast cu Cloramina care conține compuși de clor cu activitate biocidă mai slabă, diclorizocianuratul de sodiu prin hidroliză formează o serie de izocianurați clorurați și neclorurați (a nu se confunda cu cianurilre care sunt toxice) și CLOR ACTIV prin intermediul acidului hipocloros (HOCl). Acidul hipocloros provoacă hidroliza lanțurilor peptidice ale membranelor celulare ale micro-organismelor.

STABILITATE și VALABILITATE : BICLOSOL este stabil fără reducerea conținutului de clor. Termenul de valabilitate este de 36 luni (nr. lot și data expirării inscripționate pe ambalaj).

AMBALARE: cutii de plastic conținând 60, 200, 300 tablete (sau alte ambalaje la comandă).

Spitale, clinici, cabinete medicale	Rezervoare de apă potabilă	Industria de prelucrare a laptelui
Industria farmaceutică	Conducte de aprov. cu apă potabilă	Industria de prelucrare a cărnii
Industria alimentară	Canalizare și ape reziduale	Ferme de animale și păsări
Saloane de înfrumusețare	Apa potabilă	Prelucrarea legumelor și fructelor
Creșe, grădinițe, școli, internate	Apa din fântâni	Industria sucurilor și apelor minerale
Unități militare, MAI, penitenciare	Companii de APA și salubritate	Pubele, containere
Restaurante, servicii catering, hoteluri	Transport naval, aerian, feroviar	Servicii de salubritate comunale

PRODUCĂTOR



SC BORERO COMSERV SRL

BRASOV, Str. Carpenului Nr. 11, Bl.A17, Sc. C, Ap.11

Telefon/fax : 0268 -541590, 0722-327031, 0746-131655

www.biclosol.ro, www.borero.ro, office@borero.ro

Versiunea 13 / 06.2025

DOZA de APLICARE ÎN CONDIȚII PRACTICE

Aria de Aplicare	Doza de aplicare [ppm]	Doza de aplicare [tablete/l apă]	Timp de acțiune	Procedura
		Tab. 3,3 g		
Dezinfecția în domeniul sanitar, școli, grădinițe, creșe, cămine de bătrâni, hoteluri, pensiuni, nave maritime, aeronave, vagoane CFR, bănci, cabinete notariale, trezorerii, spații de lucru cu publicul larg din primării, poștă, etc. (AVIZ 5132BIO/02/12.30)				
Dezinfecția suprafețelor cu grad mic de contaminare (condiții de curățenie: bactericid-levuricid): - pardoseli, scări, parapeti, uși din: saloane de operații, săli de așteptare din spitale, cabinete medici, cabinete stomatologice, cabinete de consultații, medicale și veterinare, laboratoare de analize medicale; - obiecte sanitare: cabine de dus, covoare, căzi de baie, chiuvete, vase WC, piscoir, vase de pat, baloane piscoar, containere pentru deșeuri; - mese de operații, paturi, cărucioare, mânere, cărucioare de transport bolnavi, ambulante;	150	1 tb / 10 l	15 min.	Se șterge suprafața cu cârpă sau mopul înmuiate în soluția dezinfectantă sau prin sprayere. Suprafețele care vin în contact cu alimentele se clătesc cu apă.
Dezinfecția de nivel înalt (acțiune sporicidă) a suprafețelor (condiții de curățenie): - săli de operație; - săli de nașteri; - cabinete de consultații ginecologice; - săli de primire urgență (UPU)	750	1 tb / 2 l	60 min.	Se șterge suprafața cu cârpă sau mopul înmuiate în soluția dezinfectantă sau prin sprayere.
Dezinfecția suprafețelor contaminate cu fluide: - sânge - puroi - salivă	1.800	1,2 tb / 1 l	60 min.	Se acoperă suprafața infectată cu o cârpă înmuiată în soluție dezinfectantă. Stergeți după operație și aruncați cârpă la coșul cu deșeuri contaminate. Stergeți cu o cârpă umectată cu dezinfectant și în final cu o cârpă umedă. Purtați mănuși de protecție.
Stropire	750	1 tb / 2 l	60 min.	Se acoperă suprafața tratată în întregime.
Imersie diferite obiecte cu excepția instrumentarului medical și a obiectelor care vin în contact cu pacienții și cele cu atingere foarte frecventă	150	1 tb / 10 l	60 min.	Se imersează în soluție și după timpul de acțiune se spală cu apă de la robinet.

PRODUCĂTOR



SC BORERO COMSERV SRL

BRASOV, Str. Carpenului Nr. 11, Bl.A17, Sc. C, Ap.11

Telefon/fax : 0268 -541590, 0722-327031, 0746-131655

www.biclosol.ro, www.borero.ro, office@borero.ro

Versiunea 13 / 06.2025

DOZA de APLICARE ÎN CONDIȚII PRACTICE

Aria de Aplicare	Doza de aplicare [ppm]	Doza de aplicare [tablete/l apă]	Timp de acțiune	Procedura
		Tab. 3,3 g		
Dezinfecția în domeniul agro-alimentar: restaurante, blocuri alimentare, cantine, preparare produse din carne, preparare produse lactate, sucuri și ape minerale, plante medicinale, conserve din legume și fructe, prelucrarea peștelui, ferme de animale și păsări, ouă (AVIZ 2032BIO/04/12.30)				
Dezinfecția suprafețelor : - pardoseli, scări, parapetei, uși de acces: hale de preparare/tranșare, săli de așteptare, blocuri alimentare, laboratoare de analize, vestiare; - obiecte sanitare: cabine de dus, covoare, căzi de baie, chiuvete, vase WC, pisoir, containere pentru deșeuri; - mese de lucru, cărucioare, containere, navete	225	1,5 tb / 10 l	5 min.	Se curăță murdăria înainte de dezinfecție. Se șterge supr. cu cârpa sau mopul înmuiate în soluția dezinfectantă sau prin sprayere. Suprafețele care vin în contact cu alimentele se clătesc cu apă.
Dezinfecția suprafețelor de nivel înalt:	750	5 tb / 10 l	60 min.	Se acoperă suprafața infectată cu o cârpă înmuiată în soluție dezinfectantă. Stergeți după operație și aruncați cârpa la coșul cu deșeuri contaminate. Stergeți cu o cârpă umezită cu dezinfectant și în final cu o cârpă umedă.
Ustensile și echipament: bidoane pentru lichide, vase de stocare, ustensile de lucru, cizme, bonete,	450	3 tb / 10 l	5 min.	Se iversează ustensilele în soluție și după timpul de acțiune se clătesc.
Mijloace de transport și stocare: remorci, camere frigorifice, auto frigorifice, containere, vitrine frigorifice	450	3 tb / 10 l	5 min.	Se curăță murdăria înainte de dezinfecție. Se șterge /strobește suprafața cu soluție dezinfectantă. Supr. care vin în contact direct cu alimentele se clătesc cu apă.
Veselă și tacâmuri, căni și pahare, ustensile bloc alimentar cu acțiune mecanică/ștergere	150	1 tb / 10 l	5 min.	Se iversează în soluție și după timpul de acțiune se spală cu apă de la robinet. Soluție valabilă 24 ore.
Veselă și tacâmuri, căni și pahare, ustensile bloc alimentar fără acțiune mecanică (bactericid, levuricid)	225	1,5 tb / 10 l	5 min.	Se iversează în soluție și după timpul de acțiune se spală cu apă de la robinet. Soluție valabilă 24 ore.
Veselă și tacâmuri, căni și pahare, ustensile bloc alimentar fără acțiune mecanică (fungicid)	450	3 tb / 10 l	5 min.	Se iversează în soluție și după timpul de acțiune se spală cu apă de la robinet. Soluție valabilă 24 ore.
Veselă și tacâmuri, căni și pahare, ustensile oficii alimentare (nivel înalt/sporicid)	750	5 tb / 10 l	60 min.	Se iversează în soluție și după timpul de acțiune se spală cu apă de la robinet.
Ouă (EN 1276 - bactericid, EN 1650 – levuricid și fungicid, Salmonella t.)	150	1 tb / 10 l	5 min.	Se recomanda imersia în soluție (urmată de clătire) sau pulverizarea pe întreaga suprafața a oului sau ștergerea cu o laveta imbibată cu soluție.
Dezinfecția apei din bazinele de spălarea legumelor și fructelor înainte de conservare	3	2 tb / m3	30 min.	Fiind efervescente este suficient a fi aruncate în bazin.

PRODUCĂTOR



SC BORERO COMSERV SRL

BRASOV, Str. Carpenului Nr. 11, Bl.A17, Sc. C, Ap.11

Telefon/fax : 0268 -541590, 0722-327031, 0746-131655

www.biclosol.ro, www.borero.ro, office@borero.ro

Versiunea 13 / 06.2025

Aria de Aplicare	Doza de aplicare [ppm]	Doza de aplicare [tablete/l apă]	Timp de acțiune	Procedura
		Tab. 3,3 g		
Dezinfecția apei potabile (AVIZ 2257BIO/05/12.30)				
Dezinfecția apei potabile din bazinele de stocare și fântâni	3	2 tb / m3	30 min.	Fiind efervescente este suficient a fi aruncate în bazin.
Dezinfecția apei din fântâni în caz de forță majoră, după o inundație sau infectare ocazională	50-100	34-68 tb / m3	24 ore	Fiind efervescente este suficient a fi aruncate în fântână. Dacă este necesar, se repetă operația de 2,3 ori cu golirea fântânii și a mълului și dispariția mirosului.

PRODUCĂTOR



SC BORERO COMSERV SRL

BRASOV, Str. Carpenului Nr. 11, Bl.A17, Sc. C, Ap.11

Telefon/fax : 0268 -541590, 0722-327031, 0746-131655

www.biclosol.ro, www.borero.ro, office@borero.ro

Verslunea 13 / 06.2025